


Bredde 70 cm													
ITEM	QTY	TITLE	40-30701	40-30702	40-30703	40-30704	40-30705	40-30706	40-30707	40-30708	40-30709	40-30710	40-30711
1	1	Bordplade	60101360 (90x70cm)	60101342 (100x70cm)	60101361 (110x70cm)	60101298 (120x70cm)	60101299 (130x70cm)	60101219 (140x70cm)	60101300 (150x70cm)	60101220 (160x70cm)	60101301 (170x70cm)	60101302 (180x70cm)	60101303 (190x70cm)
4	2	Sargrør	40-30401-016	40-30401-036	40-30401-037	40-30401-038	40-30401-039	40-30401-040	40-30401-041	40-30401-042	40-30401-043	40-30401-044	40-30401-045
6	1	Benrør	40-30401-018	40-30401-046	40-30401-047	40-30401-048	40-30401-049	40-30401-050	40-30401-051	40-30401-052	40-30401-053	40-30401-054	40-30401-055
7	2	Sengehest	50-25711	50-25711	50-25711	50-25711	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712
8	4	Laske	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056	40-30401-056

Bredde 80 cm													
ITEM	QTY	TITLE	40-30719	40-30720	40-30721	40-30722	40-30723	40-30724	40-30725	40-30726	40-30727	40-30728	40-30729
1	1	Bordplade	60101373 (90x80cm)	60101374 (100x80cm)	60101375 (110x80cm)	60101376 (120x80cm)	60101377 (130x80cm)	60101378 (140x80cm)	60101950 (150x80cm)	60101315 (160x80cm)	60101332 (170x80cm)	60101380 (180x80cm)	60101323 (190x80cm)
4	2	Sargrør	40-30401-016	40-30401-036	40-30401-037	40-30401-038	40-30401-039	40-30401-040	40-30401-041	40-30401-042	40-30401-043	40-30401-044	40-30401-045
6	1	Benrør	40-30401-018	40-30401-046	40-30401-047	40-30401-048	40-30401-049	40-30401-050	40-30401-051	40-30401-052	40-30401-053	40-30401-054	40-30401-055
7	2	Sengehest	50-25711	50-25711	50-25711	50-25711	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712	50-25712
8	4	Laske	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033	40-30401-033

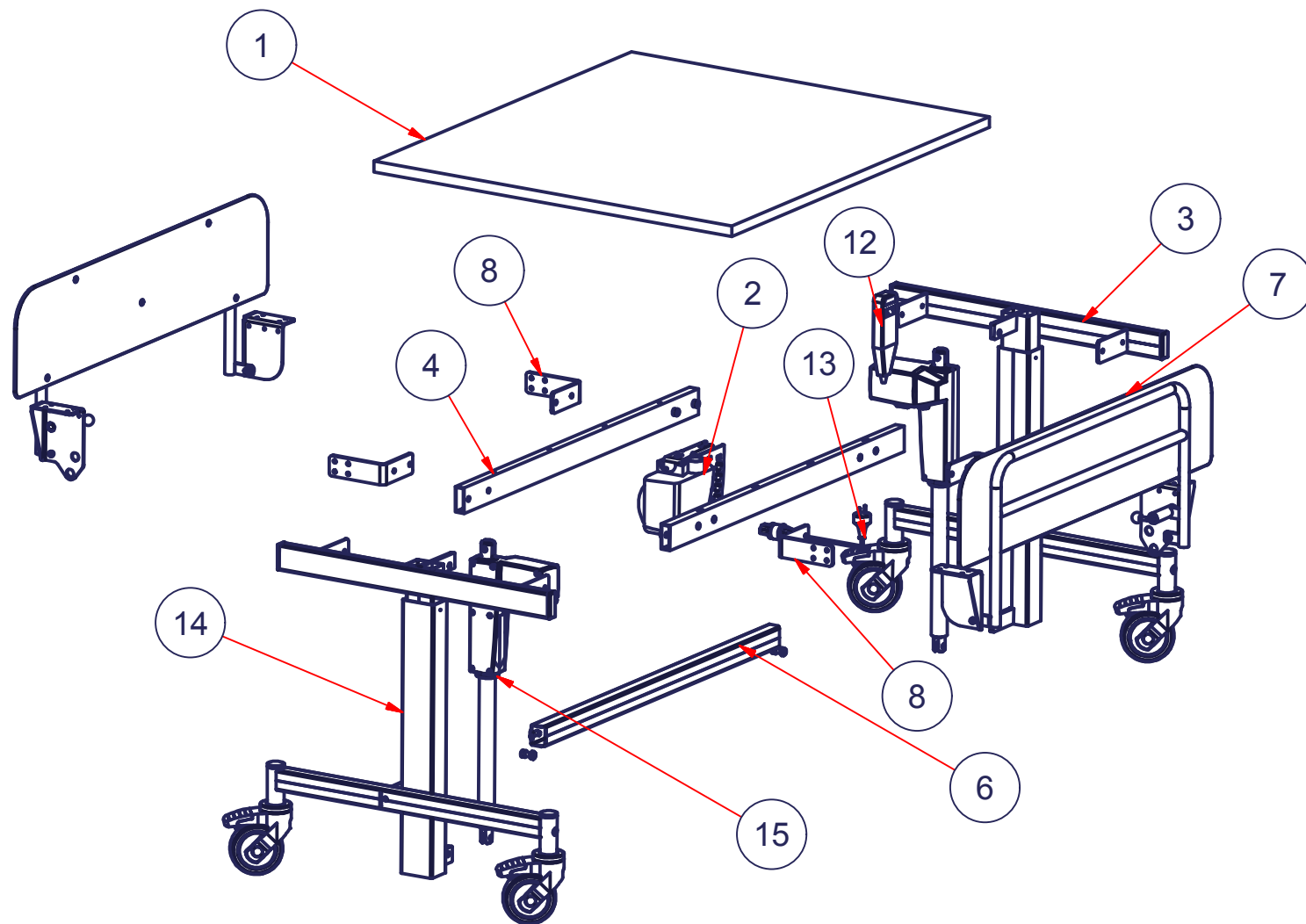

97000428	2	Aktuator LA31			15
97000427	1	Netkabel til Linak controlboks	1	0	13
97000425	1	Håndbetjening			12
97000426	1	Montage beslag			9
40-30401-020	1	Bensektion Mobilio, højre			14
40-30401-011	1	Bensektion Mobilio, venstre			3
97000421	1	Controlboks CB6	1	0	2
PART NUMBER	QTY	TITLE	L	B	ITEM

Ropox Stellebord MOBILIO [L] x 70/80 cm		Tegn.	CC	28-06-2013
Højde 65-100 cm incl. hjul		DS/ISO 2768 m		
		Vægt:	N/A	N/A
		Tegning nr.:		
Side 1 af 1		40-30719-1d		
ROPOX Better ways to better days Ringstedgade 221, 4700 Næstved Tlf.: 55750500 Fax.: 55750550				