


BRUKERMANUAL

GASSFJÆR DISTANSESTYKKER QVINTETT

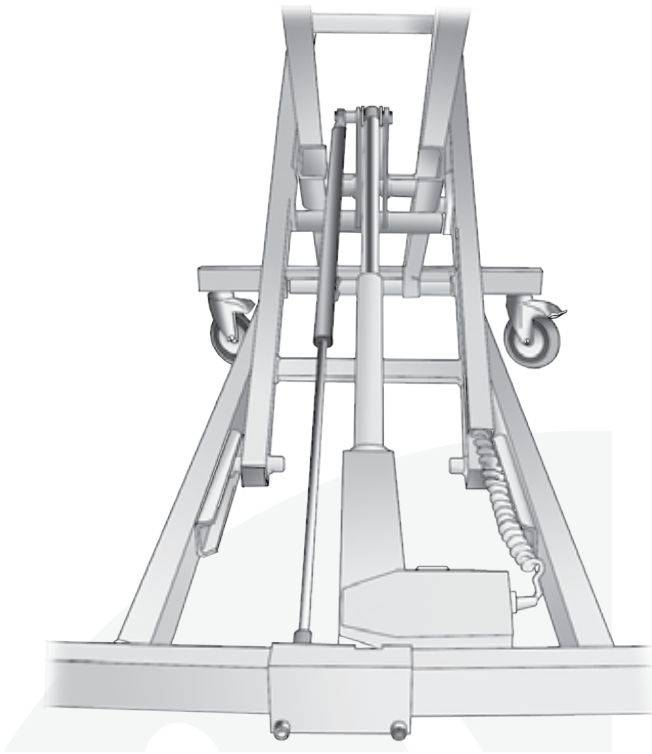

Monteringsanvisning

Montering av distansestykker

1. Distansestykkene monteres på sengeløfterens ramme (på den rammen hjulene sitter). Man fester den på undersiden på kort- eller langside.
OBS! Når distansestykkene festes på langsiden må en påse at ikke rygg eller fotmotor tar i når man senker sengebunnen.
2. For å tilpasse innfestningsstykket til rammen, skru på den grå delen av distansestykket.
3. For å tilpasse distansestykket til ulike sengebredder, skru på den svarte delen av distansestykket.



Gassfjær

Medfølger:

- 1 stk gassfjær
- 1 stk bolt 70 mm
- 1 stk bolt 50 mm
- 2 stk låsringer
- 1 stk metalledistanse 15 mm
- 2 stk plastdistanser 5 mm
- 2 stk skruer
- 1 stk beslag for ramme

Montering av gassfjær

1. Fest beslaget på rammen, skru fast med de medfølgende boltene.
2. Fjern bolten fra øvre løftmotors feste og bytt den med medfølgende 70 mm bolt. Tre bolten inn fra høyre mot venstre, tre på metalldistansen. Deretter tres gassfjæren med den "tykke" enden mot øvre motorfeste. Sett på låsringen.
3. Løsne løftmotoren i nedre motorfeste.
4. Tre to plastdistanser på 50 mm bolt. Fest gassfjæren i beslaget med 50 mm bolt. Tre bolten inn fra venstre mot høyre. Sett på låsringen.
5. Fest motor med eksisterende bolt og låsring.

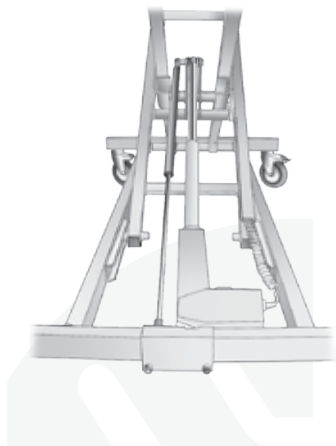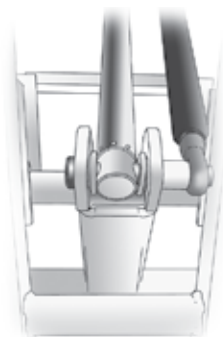



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no