


BRUKERMANUAL

BATTERIBACKUP NØDSENKING

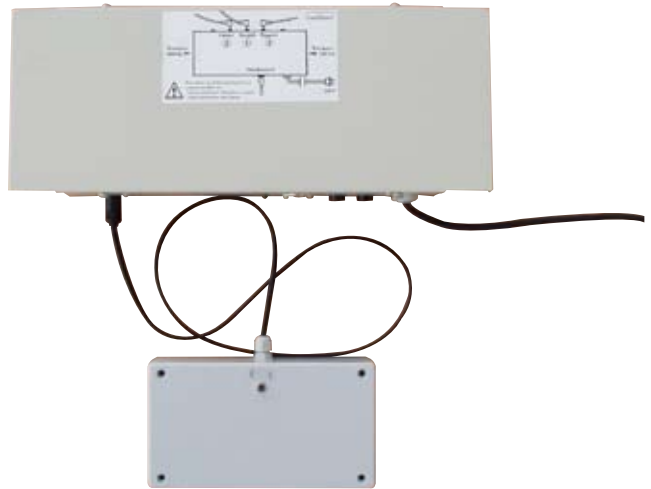

For å unngå driftsavbrudd eller uønskede forstyrrelser som følge av strømavbrudd, elektronikkfeil e.l. kan Qvintettsengene utstyres med batteribackup eller en nødsenkingsenhet.

Batteribackup

Inneholder to stk oppladbare batterier 1,2 Ah/12V. Kobles til sengens elektronikkenhet (bilde 1). Tilkoblingen er merket BATTERI 24V.

Batteribackupen rekker til ca 10 løft med sengeløfteren.

Lading av batteribackup

Lading av batteriene foregår ved kobling til en seng som er i normal drift. Lading bør skje en gang i måneden, og bør lades minst 3 timer.

Før lading: Sett bryteren i posisjon "ON".

Ved bruk: Sett bryteren i posisjon "ON".

Ved lagring: Sett bryteren i posisjon "OFF".

Nødsenkingsenhet

Inneholder to stk engangsbatterier 9V/6LR61 DURACELL ULTRA M3.

Benyttes til å senke en motor med "tvangskjøring" (f.eks senke ryggdelen).

Nødsenkingsenheten kobles direkte på motoren som skal kjøres (bilde 2).

Ta motorkontakten ut av elektronikkenheten og sett den i nødsenkings-enheten.

Når nødsenkingsenheten er brukt bør batteriene skiftes for å oppnå full effekt neste gang.



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no