

BRUKERMANUAL

# TRANSPORTVOGN COMFORT



Varenr: 8051

Vekt: 12 kg

Bredde: Vogn med sengeramme ca 75 cm

Vogn uten sengeramme ca 45 cm

## Opp på transportvognen

1. Hev sengen til en god arbeidshøyde.
2. Legg transportvognen på sengen og spenn den fast med to remmer.
3. Dra remmene over sengebunnen, transportvognens ramme og sengerammen - stram hardt til.  
**OBS!** Dra ikke remmene under sengebunnen, da låser du løfteren.
4. Rett transportvognens nedre hjulpar oppover og lås dem.
5. Se til at du har nok plass mot den siden du skal velte sengen.
6. Kjør sengen ned ca 20 cm under arbeidshøyde før sengen tippes.
7. Tipp til transporttrallens nedre hjul møter gulvet.
8. Bruk sengeløfteren for å heve sengen.
9. Ta et nytt tak og snu samtlige hjulpar opp.
10. Kjør sengeløfteren til laveste nivå - sengen er klar for transport.

## Ned fra Transportvognen

1. Lås transportvognens hjul.
2. Kjør ut sengeløfteren.
3. Vipp ned sengeløfteren så den står på hjulene.
4. Bruk sengeløfteren for å lette på senkingen av sengen.
5. Ta tak i sengens langsider/sengegrind og kjør løfteren ned.  
Da kjennes sengen nesten vektløs og kommer nesten til å tippe av seg selv.
6. Hev sengen til en god arbeidshøyde, dette gjør fjerningen av transporttrallen lettere.



handicare

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside [www.handicare.no/bolig](http://www.handicare.no/bolig)

Tlf: 03250  
Faks: 85 02 88 22  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)