

QVINTETT S/A/A4

Feilsøkingsskjema

1	Sengen fungerer av og til	Bytt håndkontroll	Feilen forsvinner	
			Feilen fortsetter	Bytt elektronikk
2	En motorfunksjon er borte	Kontrollerer motor-kontakter	Feilen forsvinner	
			Feilen fortsetter	Bytt håndkontroll
			Feilen fortsetter	Om relelyd høres ved aktivering - bytt motor for den funksjonen
3	Sengen klarer ikke å løfte med normal belastning	Bytt elektronikk		
		Feilen fortsetter	Bytt løftemotor	
4	Sengen er helt stille ved aktivering	Bytt håndkontroll	Feilen forsvinner	
			Feilen fortsetter	Se over kontaktene inn til elektronikkboksen
			Feilen fortsetter	Elektronikkboks