

# QVINTETT

## Serviceskjema



Dato:

Ettersyn Sign.:

Adresse for ettersynet:

Hjelpemiddelnummer:


Individnummer:


Serienummer:

Produksjonsnummer:

Følg punktene i skjemaet for økt sikkerhet, minsket slitasje og høyere ytelse.

I denne instruksjonen har noen punkter fått symbolene  eller , dette er en påminnelse om smøring.




 = smør med Prime

 = smør med Litiumfett


Tørk bort overflødig fett etter smøring. Vær nøye med å unngå spill av smøremiddel på gulv og omkringliggende miljø. Spill av smøremiddel på gulv gir stor fare for å skli.

1	Elektronikk	OK	Tiltak	Utført dato	Sign.
1.1	Ledning fra vegguttak samt kontakt er uskadd	<input type="checkbox"/>			
1.2	Grønn kontroll-lampe lyser	<input type="checkbox"/>			
1.3	Ledninger og kontakter er uskadede og rett koblet	<input type="checkbox"/>			
	1.3.1 Ryggmotor	<input type="checkbox"/>			
	1.3.2 Fotmotor	<input type="checkbox"/>			
	1.3.3 Løftemotor	<input type="checkbox"/>			
	1.3.4 Håndkontroll	<input type="checkbox"/>			
	1.3.5 Evt. tilkoblet batteri back-up	<input type="checkbox"/>			

2	Sengeløfter	OK	Tiltak	Utført dato	Sign.
2.1	Sengeløfterens arbeidsområde er ca. 50 cm	<input type="checkbox"/>			
2.2	Synlige skader på løftemekanikk	<input type="checkbox"/>			
2.3	Skader eller unaturlig stor slark i fester og ledd	<input type="checkbox"/>			
2.4	Lager og lagerbaner. Tørk rent og smør på nytt 	<input type="checkbox"/>			
2.5	Løftemotorens festepunkter, hurtigkoblingsbolter og låseringer 	<input type="checkbox"/>			
2.6	Synlige ytre skader på løftemotor	<input type="checkbox"/>			
2.7	Hjul m/brems, alt. sentralbrems	<input type="checkbox"/>			
2.8	Synlige lakkskader	<input type="checkbox"/>			

3	Sengebunn	OK	Tiltak	Utført dato	Sign.
3.1	Synlige skader på sengebunn-mekanikken	<input type="checkbox"/>			
3.2	Festene for rygg- og lårdel er uskadede og har ikke unaturlig stor slark 	<input type="checkbox"/>			
3.3	Ryggen kan heves til ca. 75 grader	<input type="checkbox"/>			
3.4	Plasthengslene i ryggdelen er uskadede og har ikke unaturlig stor slark 	<input type="checkbox"/>			
3.5	Trespiler og fester er uskadede og trespiler sitter på plass	<input type="checkbox"/>			
3.6	Synlige skader på ryggmotor	<input type="checkbox"/>			
3.7	Fester for ryggmotor er uskadede og har ikke unaturlig stor slark	<input type="checkbox"/>			
3.8	Ryggmotors hurtigkoblingsbolter sitter ordentlig i og er sikret 	<input type="checkbox"/>			
3.9	Fotdel går opp i riktig høyde	<input type="checkbox"/>			
3.10	Fotdel går ned under horisontallinjen	<input type="checkbox"/>			
3.11	Plasthengsler i lår-/fotdel er uskadede. Splint og låsering er intakt	<input type="checkbox"/>			
3.12	Synlige skader på fotmotor	<input type="checkbox"/>			
3.13	Fester for fotmotor er uskadede og har ikke unaturlig stor slark	<input type="checkbox"/>			
3.14	Fotmotors hurtigkoblingsbolter sitter ordentlig i og er sikret	<input type="checkbox"/>			
3.15	Synlige lakkskader	<input type="checkbox"/>			

4	Sengegrinder	OK	Tiltak	Utført dato	Sign.
4.1	Synlige skader på sengegrind	<input type="checkbox"/>			
4.2	Grind går lett opp og ned	<input type="checkbox"/>			
4.3	Grind låser som den skal	<input type="checkbox"/>			
4.4	Unaturlig stor slark eller løsnete skruer	<input type="checkbox"/>			

5	Sengeramme (gavler + sengesider)	OK	Tiltak	Utført dato	Sign.
5.1	Dra til skruene som holder gavlene og sengesidene	<input type="checkbox"/>			
5.2	Sporet som grinden går i. Smør samtlige overflater i sporet. 	<input type="checkbox"/>			
5.3	Dra til samtlige skruer som holder gavler og sengesider	<input type="checkbox"/>			

<b>1</b>	<b>Elektronikk</b>
1.1	Eventuelle defekte deler byttes
1.2	Grønn lampe indikerer om strømtilførselen til sengen er ok Lyser den ikke, bytt elektronikkboks
1.3	Eventuelle defekte deler byttes
<b>2</b>	<b>Sengeløfter</b>
2.1	Løfter sengen med avvik på ca. 10 cm bør motoren byttes ut
2.2	Bytt eventuelle defekte deler
2.3	Sjekk de rørlige delene for slitasje: Lagre, lagerbaner, akslenes innfestninger
2.4	Bytt lager hvis nødvendig
2.5	Sjekk at splinter og låseringer er intakte og sitter ordentlig i Slitte bolter skiftes ut
2.6	Bytt motorer som har ytre skader som kan ha/har effekt lenger inn i motoren.
2.7	Hjulene med brems: Skal være festet til løfteren uten noen form for slark Ved slark, skru til bolten som fester hjulet i løfteren Sentralbrems: Sjekk at alle hjulene låses og at de blir låst. Hvis ikke må bremsen justeres eller byttes ut
2.8	Lakkskader bør utbedres. Fargekode: NCS 2005G80Y
<b>3</b>	<b>Sengebunn</b>
3.1	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.2	Hvis innfestningene er skadde, bytt ut glidelageret (er teflonbehandlet)
3.3	Dersom ryggmotor hever dårlig: Skift motor
3.4	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.5	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.6	Skadet ryggmotor bør byttes ut
3.7	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.8	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.9	Dersom fotmotor hever dårlig: Bytt motor
3.10	Dersom fotmotor fungerer dårlig: Bytt motor
3.11	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.12	Skadet motor bør byttes ut
3.13	Eventuelle defekte deler byttes ut
3.14	Sjekk festene og bytt eventuelle deler med synlig slitasje
3.15	Lakkskader bør utbedres. Fargekode: NCS 2005G80Y
<b>4</b>	<b>Sengegrinder</b>
4.1	Skadde deler byttes ut
4.2	Dersom grinden ikke glir lett; sjekk hva som hindrer bevegelsen Smør eventuelt ledd med miljøvennlig smøremiddel
4.3	Dersom den ikke låser som den skal, sjekk låsemekanismen Hvis den ikke er skadet, smør den med miljøvennlig smøremiddel Dersom den fortsatt ikke låser rett, bytt sengegrind
4.4	Synlige lakkskader bør utbedres. Fargekode: NCS 2005G80Y
<b>5</b>	<b>Sengeramme (gavler + sider)</b>
5.1	Skrueene til grindbommen må ikke røres fordi de er festet med Locktite