

# Brukerveiledning

---

## IR-9MP COMFORT



IR mottager IR 9MP COMFORT

Art. nr.: 2443015

IR-9MP COMFORT .....	1
Beskrivelse.....	2
Koplingskjema .....	3
Rengjøring.....	4
Tekniske data.....	4
Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet.....	4

---

### GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)  
Website: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

## Beskrivelse

IR-9MP er en programmerbar IR-mottager tilpasset for å koples til sengemodellen Quintet. Maksimalt 6 funksjoner kan styres på sengen, hjertebrettet, bendelen og hev-senk av hele sengen.

## Tilkopling av IR-mottager

Kople til IR-mottagerens to kabler til sengens elektronikk. Sengens håndkontroll kan koples til IR-mottageren for å virke parallelt. Heng IR-mottageren på sengens understell. Plasser IR-mottageren slik at mottagerforholdene optimaliseres, rettet ut i rommet. På innsiden av festebraketten er det borrelås for å sikre at mottageren forblir i riktig posisjon.

Se til at ingen av kablene kommer i klem! Fest kablene med strips som følger med. Kontroller at kablene er lange nok når sengen er hevet i øverste posisjon.

OBS! Rekkevidden avtar hvis detektor-øyet tildekkes av en eller annen grunn, som for eksempel av gardiner eller møbler.


## Programmering av kanaler

Mottageren er fabrikkinnstilt på kanalene 16-23. Mottageren er innstilt for å fungere sammen med en IR-sender med 8 funksjoner (IR-9SP eller IR-9SO). Hvis en annen sender eller andre kanaler skal benyttes, må IR-mottagerens kanaler programmeres om. Det gjøres på følgende måte:

Trykk inn en programmeringsknapp på IR-mottagerens kretskort og trykk samtidig på den tasten på senderen som skal aktivere respektive funksjon på IR-mottageren. IR-mottageren lærer seg nå hvilken kanal som sendes. Hvis programmeringsknappen holdes inne ca. 1 sekund, blir funksjonen monostabil. Hvis programmeringsknappen holdes inne i ca. 4 sekunder blir funksjonen bistabil. OBS! Ved betjening av seng får **ingen** funksjoner være bistabile. Mottageren bekrefter innprogrammeringen ved at indikeringslampen blinker. Fortsett med å programmere de neste utgangene.

## Merking av tastene

Etiketter for merking av tastene følger med for senderne IR-9SP, IR-9SO, IR-5SP og IR-5SO. Fjern forsiktig fingerguiden. Ta bort beskyttelsesfolien på etiketten over tastene og klistre på etikettene. Legg deretter på beskyttelsesfolien over merkeetikettene. Sett på fingerguiden.

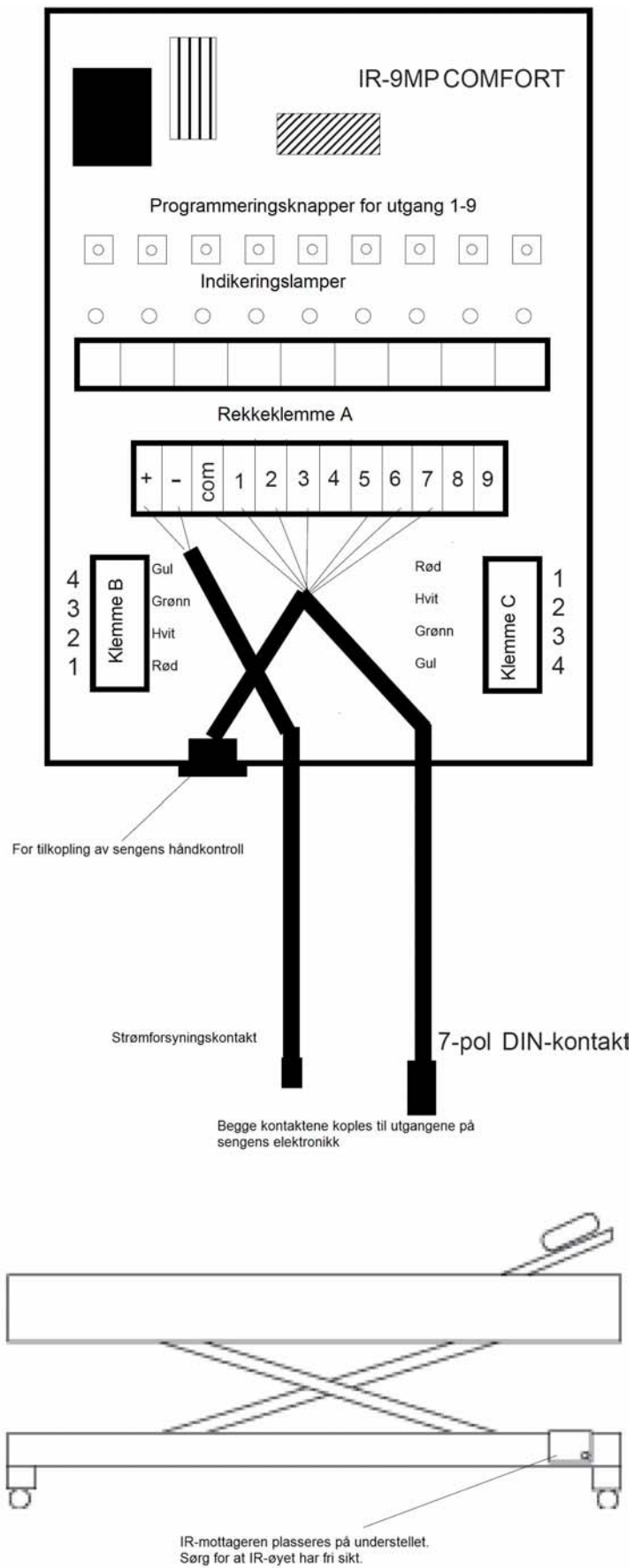

**Koplingskjema**

## **Rengjøring**

Mottagerens holdes ren ved å tørke av den med en **godt oppvridd klut** med mildt såpevann. Etter rengjøringen tørkes den av med en tørr klut.

## **Tekniske data**

Driftsspenning: 12-24 V DC  
Maks. strømforbruk i hvile: 11 mA  
Maks. relébelastning  
per utgang: 140 mA fra serienr. 497282  
110 mA før serienr. 497282  
Programmeringskanaler: GewaLink-kanalene 0-127 (kanal 62 har ingen funksjon) og  
4096 kode.  
Omgivelsetemperatur: -40° - +40°C,

## **Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet**

IR 9MP markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for handikappede og oppfyller kravene i det Medisintekniske direktivet 93/42/EEC noe som for eksempel inkluderer relevante krav for EMC og elektrisk sikkerhet.



### **Gewa AS**

Postboks 626, Trollåsveien 8, N-1411 Kolbotn  
Tlf.: 66 99 60 00      Telefaks: 66 80 94 90      Teksttlf.: 66 80 93  
90  
E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)      Hjemmeside: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

Versjon: A. Dato: 08.10.2002