

BRUKERMANUAL

# SENTEGRIND QV-162




## Monteringsanvisning

### Montering av grind


Sengegrind QV-162 monteres direkte på sengebunnens langsgående metallrør. Sengegrinden plasseres derfor mellom madrass og sengens tregrindside.

1. Plasser sengegrinden vist på bilde 1 slik at grindens bolter passer mot sengebunnens forborede hull.

**OBS!** Sengegrindens låsemekanisme skal peke mot sengens fotgavl.

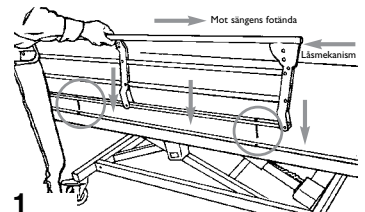


2. Trykk ned grinden (bilde 2) mot sengebunnens langsgående metallrør. Vis forsiktighet slik at gjengene på boltene ikke skades.

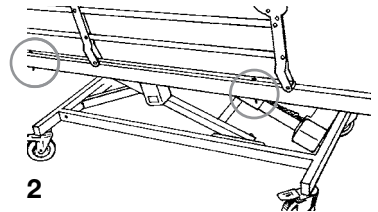

3. Fest sengegrinden (bilde 3) ved hjelp av de to skruhåndtakene. Stram til ordentlig og kontroller at grindens nederste metalldel ligger flatt mot sengebunnens metallrør.

**OBS!** Skruhåndtaket er fjærbelastet, hvilket innebærer at håndtaket kan plasseres valgfritt uten å påvirke mutteren. Dra håndtaket utover og plasser det i ønsket posisjon.

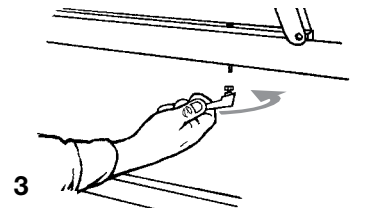

### Demontering av grind

Løs begge skruhåndtakene og løft av grinden.

**NB!** Vis forsiktighet slik at gjengene på boltene ikke blir skadet.

## Bruksanvisning

### 1. Fell opp grinden

Hold med en hånd i grindens øverste metallrør (markert med "LØFT HER") nær grindens låsemekanisme.

Løft rett opp/bakover til grinden er i øverste posisjon. Slipp grinden.

**NB!** Kontroller at grinden er låst ved å presse grinden mot fotgavlen.

### Fell ned grinden

Hold med en hånd i grindens øverste metallrør (markert med "LØFT HER").

Løft rett opp og fell grinden ned mot fotgavlen.

**NB!**

Kontroller at den sengeliggende ikke har armer eller ben ut gjennom grinden.

## Vedlikehold

Sengegrind QV-162 krever normalt ikke fortløpende vedlikehold.

### Vanlig rengjøring

Sengegrind QV-162 kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

### Kvartalsvis tilsyn

Kontroller at ingen unormale glipper oppstår eller at skruhåndtakene løsner.



handicare

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside [www.handicare.no/bolig](http://www.handicare.no/bolig)

Tlf: 03250  
Faks: 85 02 88 22  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)