


BRUKERMANUAL

GALGEN

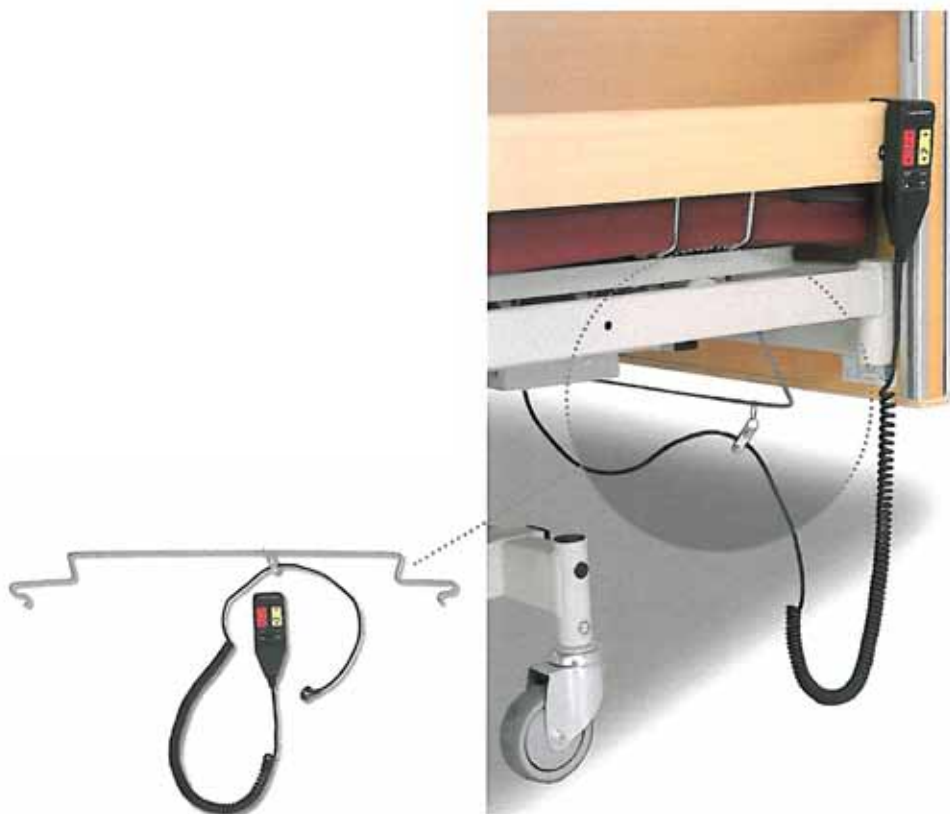

Montere håndkontroll

1. Løse håndkontrollen fra sengen og ta bort den befintliga kabelavlastningen.
2. Monter håndkontrollens kabel i GALGENS kabelavlastning som på bildet. Avstand fra kontakten til kabelavlastningen skal være ca 40 cm.



Montere GALGEN på sengen

1. GALGEN skal henges i hullene i sengens gavelplate. Se bildene.
2. Kontroller at ledningens oppheng kan bevege seg fritt på GALGEN.





handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig