

MONTERINGSANVISNING


QVINTETT S/A/A4



1. Plasser sengebunnen på sengeløfteren


Riktig arbeidsstilling oppnås ved at sengeløfteren kobles til et strømuttak og heves til passe arbeidshøyde. Plasser sengebunnen på sengeløfteren som illustrert.

OBS! Sengens fotende skal plasseres over sengeløfterens fotende (over løftemotoren – se punkt 2)! Lås hjulene på sengeløfteren.

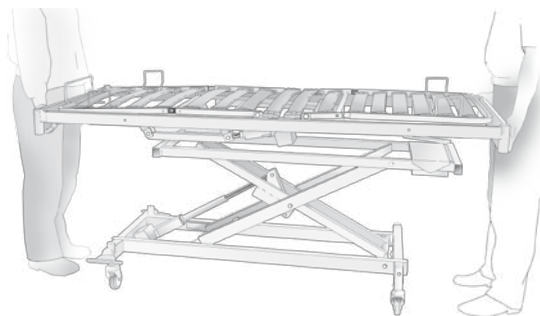

2. Riktig plassering


Riktig plassering innebærer at sengebunnens hurtigfester skal stemme overens med sengeløfterens festebeslag. Det er to fester i fotenden og ett feste i hodeenden.

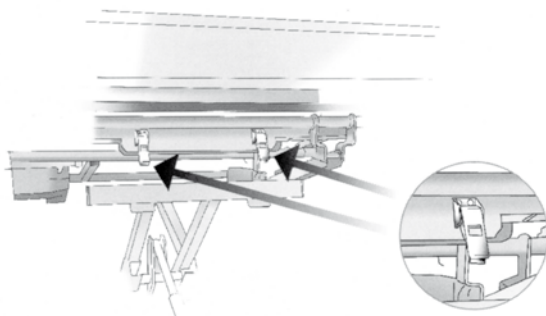

3. Sengebunnens hurtigfeste

Fest hurtigfestets krok i sengeløfterens festebeslag. Løft hurtigfestets øvre del slik at kroken ”rekker ned”. Klem ned hurtigfestets øvre del og pass på at sperren låser i denne stilling.


Ved demontering: frigjør hurtigfestets øvre del gjennom å trykke ned låsemekanismen, fell opp den øvre delen og frigjør kroken.

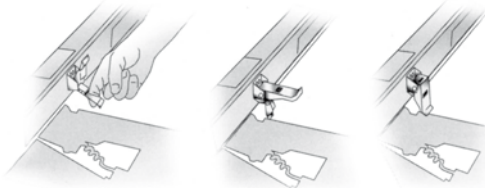

4. Tilkobling av motor


Plugg sengebunnens rygg- og fotmotor i sengeløfterens elektronikkboks. Følg merkingen på elektronikkboksens lokk. For å forenkle tilkoblingen av kontaktene – løft lett i elektronikkboksen.

OBS! Motorkablene skal ligge over sengeløfterens tverrgående rør (se bildet).

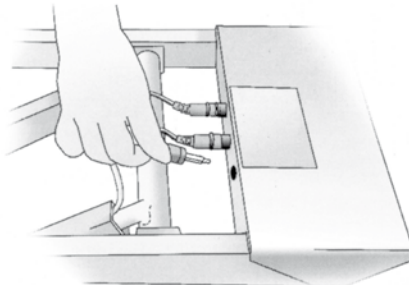

5. Regulering av lengde


Sengebunnens lengde kan reguleres ved å justere sengebunnens fotgavl og madrass-stopper. Før justering – legg merke til hvordan fotgavlens markeringer (små nedsenkninger) står i forhold til sengebunnen. Løsne umbrakoskruene og juster til ønsket lengde i steg á 5 cm. Still fotgavlens markeringer ihht. utgangsposisjonen og skru fast umbrakoskruene. Juster madrass-stopperen i fotenden på tilsvarende måte.

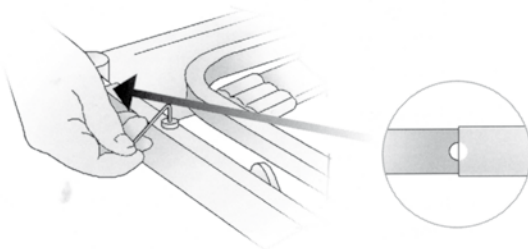

6. Montering av gavl og langside


Monter messingtoppen på boltene og sett disse i gavlens forborrede hull. Plasser gavlen mot kortsiden av sengebunnen slik at boltene passer overens med hullene i sengebunnens kortsider. Skru fast mutteren slik at gavlen sitter stabilt.

Om fast langside skal monteres, gjør tilsvarende montering mot sengebunnens langsgående profilrør.

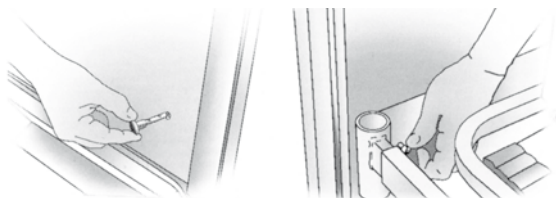


7. Låsning av hjul

Sengen kan være utstyrt med individuelt låsbare hjul eller med sentralbrems. Individuell låsing – tråkk ned den lille sperren på hvert hjul. Frigjør ved å tråkke sperren mot sengen.

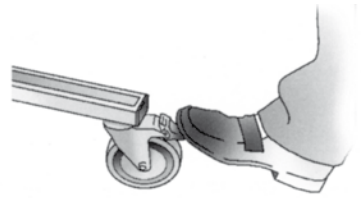

Viktig! Lås alltid minst to hjul!

Sentralbrems – tråkk på en av pedalene som finnes over hjulene i sengens fotende. Tråkk den røde pedalen helt ned = låst, tråkk den grønne delen helt ned = retningssperre på.

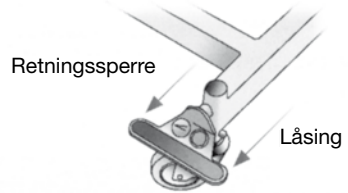

Når pedalen står i horisontal stilling er sengen ikke låst.

8. Håndtering av sengebunnens deler

På Qvintett modell S kan sengebunnens ryggstøtte, lår- og fotdel enkelt tas av sengebunnen. Rett opp den valgte delen slik at den står i rett vinkel mot sengebunnen og løft den rett opp slik at delen frigjøres fra festepunktene.

OBS! Utnytt denne muligheten når sengen håndteres i trange omgivelser, for å redusere vekten på sengebunnen eller i forbindelse med rengjøring.



På Qvintette type A (aktiv rygg) kan bare lår- og fotdel fjernes på denne måten. Ryggdelen kan felles opp manuelt for rengjøring etc.


9. Demontering av elektronikkboks

Elektronikkboksen er montert på sengeløfteren under sengebunnens hodeende.


OBS! Strømkabelen må IKKE være plagget til vegguttaket ved demontering!

Ved montering – gjør nedenstående i omvendt rekkefølge.



1. Ta ut motorkontaktene

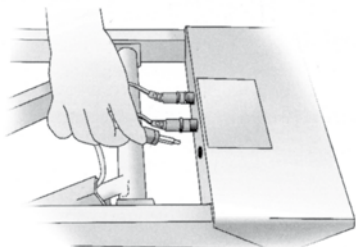

2. Trekk ut stikkkontakten til håndkontrollen.

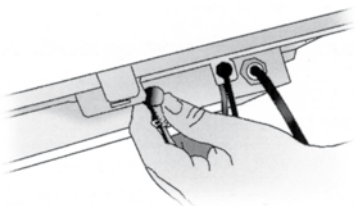

3. På siden av boksen sitter små plastplugger som transportsikring – disse løsnes. Ta så ut elektronikkboksen.

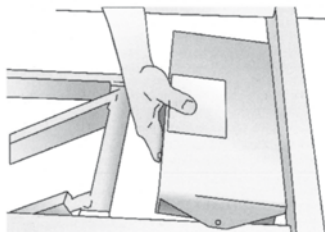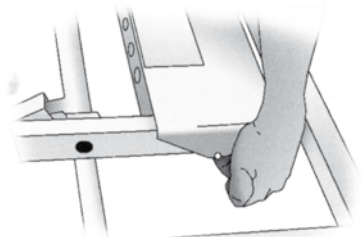



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av monteringsanvisningen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no