

KOBLINGSSKJEMA

Infrarød sengestyring

1. Ta ut standard håndkontrollen ut av elektronikkens dinkontakt, frigjør håndkontrollen gjennom å ta bort strekkavlastningen på kabelen.
2. Koble forgreiningssboksen til dinkontakt på elektronikkboksen.
3. Koble IR mottakeren i forgreiningssboksens dinkontakt, som er merket "Fjær".
4. Koble standard håndkontrollen i forgreiningssboksens dinkontakt, som er merket "Handkontroll".

