

Bruksanvisning

2010/08

Curera® Positionering

Avser produkterna:
Curera® Positioneringskudde
Curera® Positioneringsrulle
Curera® Ryggkudde
Curera® Nackkudde
Curera® Multikudde
Curera® Stödkil

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001005



7 331345 011912



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Rengöring	5
Övrig information	6

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! Var särskilt uppmärksam där sänggrindar används. Undvik skador från vassa föremål som kan påverka hygienskyddets funktion.
4. Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.

1 Introduktion

Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna produkt är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42 EEC. Den uppfyller tillämpliga delar i kraven för följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

1.2 Avsedd användning

Curera® Positionering är en serie kuddar och kilar som används för att avlasta och positionera brukare i alla typer av vårdmiljöer. Sortimentet är brett och täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. Lägesändring behövs alltid, även när man använder sig av Curera® Positionering. Positionering handlar om att det ska vara bekvämt för brukaren, det är därför viktigt att alltid fråga vad brukaren tycker. För känslan och komfortens skull rekommenderar vi inte att hygienskyddet läggs direkt mot huden. Använd Curera® Positionering så att ingen översträckning sker eller att kontrakturer uppstår. Positionering kan ske utifrån diagnos och ska beaktas med hänsyn till eventuella kontraindikationer.

De är enkla att använda och det finns flera olika användningsområden för kuddarna.

1.3 Produktbeskrivning

Curera® Positionering finns i flera olika storlekar och former.

- Positioneringsrullen finns i storlekarna 15x60, 20x125, 20x225 cm
- Positioneringskudden finns i storlekarna 25x80, 50x60, 50x85 cm
- Multikudden finns i storleken 75x75 cm
- Stödkilen finns i storleken 70x26x15/5 cm
- Nackkudden finns i storleken Ø50 cm
- Ryggkudden finns i storleken 50x85 cm

Fyllning: Positioneringsrulle, Multikudde, Ryggkudde, Positioneringskudde, Nackkudde: 50% skum, 50% polyesterfibrer.

Stödkil: 100% kallskum.

Garanti: 1 år.

1.4 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

2 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

2.1 Normal rengöring

INNERKUDDE

Om hygienskydd används skyddar det innerkudden, så rengöring av denna blir sällan nödvändig. Om innerkudden trots allt blir smutsig så tvätta i maskin i max 95°C. Kan torktumlas/torrskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering 3-4 gånger.

HYGIENSKYDD (tillbehör)



Överdraget kan maskintvättas i max 95°C, torktumlas, alternativt dropptorkas.



Överdraget kan även torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1%.

Viktigt!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut.

3 Övrig information

3.1 Förvaring

Förvaring bör ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara produkten så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller liknande. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.

3.2 Märkning

Produkten är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer, samt en ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer).

3.3 Garanti

Denna produkt omfattas av 1 års garanti. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering/skötsel.

3.4 Service och underhåll

Produkten kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

3.5 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och ska källsorteras som 'brännbart avfall'. Ingen demontering är nödvändig.

3.6 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

OBS ! Skriv ner ärendet, kontaktperson, adress och telefonnummer i ett brev och bifoga med varan.

3.7 Symbolförklaring



Läs bruksanvisningen



Brandklassning



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Garantitid



Kastas ej i hushållsavfall,
följ instruktioner för återvinning



Kan återvinnas



Avtorkning



Ej strykning



Maskintvätt 95° C



Torktumling



Droptorkning



Ej kemtvätt



<1% Klor



Tillverkare/Manufactured by

 **care of sweden**

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600
Fax: 0325-128 40
E-post: info@careofsweden.se
Internet: www.careofsweden.se

Akuta ärenden, efter kontorstid:

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 158
512 24 Svenljunga

Besöks-/godsadress:

Boråsvägen 14
512 53 Svenljunga

© Care of Sweden AB, 2010
Care of Sweden och Curera är varumärken som tillhör Care of Sweden AB.