

Brukermanual

KRYKKER OSSENBERG



Modellnummer 220, 230, 241, 320, 321, 332, 521

OBS! Les instruksjonene nøye før krykken tas i bruk.


Albuekrykker er et hjelpemiddel for personer med nedsatt gå-og/eller ståfunksjon og skal ikke brukes til annet formål. Krykkene kan brukes både inne og ute.

Enkel høydejustering, høy materialkvalitet og refleks foran og bak sikrer økt sikkerhet og brukervennlighet. Mellom rørene sitter en plastring som sikrer klikkfri gange på krykken. Materialet i underarmstøtten består av 15 % glassfiber som gjør plastdelen mer fleksibel ved temperaturforandringer samt minsker ubekvemt trykk om brukeren har bredere underarmer eller tykkere klær som for eksempel tykke vinterklær. Doppskoer er produsert i naturgummi for et bedre grep og har et metallinnlegg slik at den blir mer slitesterk.

Utprøving skal foregå i samråd med personer som har kunnskap om produktet og egenskapene det innehar. Feil innstilt krykke kan føre til feilbelastninger og i verste fall være en sikkerhetsrisiko og føre til fall/skader.

For rett bruk av krykken skal den individuelt høydejusteres til brukeren av kvalifisert personell.

Trykk in knappen som låser begge rørene, dra juster rørene til ønsket lengde. Lås deretter rørene igjen ved å matche høydejusteringshullene og se til at låseknappen "knepper" på plass igjen.

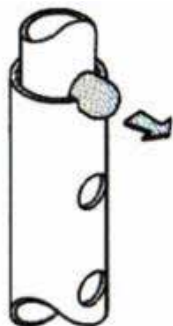

OBS! Kontroller at begge rørene er låste og at trykknappen er på plass gjennom å dra og vri på begge rørene!

Generell produktinformasjon

- Høy brukervekt, OBS! Se maks brukervekt innprentet på hver krykke.
- Enkelt eller dobbelt justerbar med enten trykknapp eller klips.
- Produsert i materialer med høy kvalitet.
- Reflekt foran og bak for økt sikkerhet.
- Doppsko med metallinnlegg for økt levetid og holdbarhet.
- Individuelt justerbare for tilpasning til de fleste brukere.

Tekniske spesifikasjoner

Rør: Anodisert aluminiumslegering

Håndtak: Høykvalitets plastikk, glass-fiber forsterket materiale

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hold krykken nær kroppen og vinkle den ikke utover men så rett ned mot bakken som mulig.
- Velg stabilt fottøy med lav hæl.
- Det er ikke tillatt å henge vesker, bager, poser, etc. på krykkene. (Fig. D)
- Det er ikke tillatt å gjøre mekaniske forandringer på krykkene. Det vil medføre fare for sikkerheten.
- Av same årsak skal kun originale reservedeler/tilbehør benyttes.
- Godt underlag er essensielt for friksjonen mellom krykken og underlaget.
- Vær spesielt oppmerksom på at friksjonen blir mindre og krykken lettere kan slippe taket på underlaget når det er f.eks. sand, grus, løv og etc. på bakken!
- Meget viktig å ikke overstige brukervektbelastningen!
- Krykker har lite/ingen friksjon på isete, glatte eller våte underlag.
- Justeringshullene for høydejusteringen er utsatt for slitasje. Se til at disse ikke er slitte eller skadet, da kan låseknappen/klipset gli ut av posisjon og krykker er ikke lenger like trygg.
- Krykkene kan kun bli brukt etter produsentens instruksjoner.
- Aldri overgå produktets maks brukervekt som er spesifisert på produktet.
- Skadede eller bøyd krykker skal ikke gjenbrukes.
- Bøyd krykke skal ikke bli forsøkt rettet ut, da de kan ha fått skade og ikke vil være trygge.
- Alle fester/skruer må sitt forsvarlig festet. Dette skal undersøkes før hver bruk av krykken.
- Doppskoen til krykken skal ikke bli for slitt. Da skal den byttes ut. Slitte doppsko reduserer sikkerheten.
- Ved synlige skader skal ikke krykken benyttes. Kontakt stedet der du fikk utlevert/kjøpt krykken.

Fig. D



Vær varsom ved bruk av krykker med lukket overarmstøtte!

Overarmstøtten er bevegelig, bruk varsomt, det kan oppstå klemfare for hud og fingre



Lagring og vedlikehold

- Krykkene skal ikke utsettes for sterk varme, f.eks. inntil piper, ovner, sterkt sollys og lignende.
- Se til at krykkene ikke skades av fall og får skader i plastdetaljer eller lakk. (Bruk wrist loop eller krykkeholder).
- Bytt ut slitedeler ved behov.
- Om krykkene ikke har vært benyttet på lengre tid, skal de undersøkes av kvalifisert personell før bruk.
- Det anbefales ikke å lagre krykkene mer enn 2 år.

Advarsel!

- Rengjør aldri krykkene med oljebasert middel. Det oppstår fare for å gli og miste grepet.
- Ved behold rengjør krykkene med et mildt rengjøringsmiddel og tørk av smuss og støv.

Merk

Om bruk av desinfeksjon er nødvendig, bruk et passende desinfeksjonsmiddel. Se produsentens spesifikasjoner på www.ossenberg.com

Tilbehør og reservedeler

Tilbehør

Artikkel	Armbøylepolster	Håndtakpolster	Jolo-Renttol med Vulkolan-bearing-surface	Jolo-Renttol-ball joint capsule	Sammenleggbar ispigg
241 D/C	Art. 2700P	Art 140P	Art. 93816P	Art. 930P	Art. 1718
320 D/C	Art. 2690P	Art. 142P	Art. 93816P	Art. 930P	Art. 1718
321 D/C	Art. 2690P	Art. 142P	Art. 93816P	Art. 930P	Art. 1718
521 D/C	Art. 2690P	Art. 142P	Art. 93816P	Art. 930P	Art. 1718
220 D/C	Art. 155P	Art. 142P	Art. 93816P	Art. 930P	Art. 1718
230 D	Art. 155P	Art. 142P	Art. 93820P	Art. 930P	Art. 1718
332 C	Art. 2690P	Art. 142P	Art. 93820P	Art. 930P	Art. 1718

Reservedeler

Article	Trykknapp med fjær	Klips	Pakning mellom rør	Refleks	Doppsko 16 mm	Doppsko 19 mm
241 D/C	132	-	145	152	716	-
320 D/C	132	131	145	152	716	-
321 D/C	132	131	145	152	716	-
521 D/C	132	131	145	152	716	-
220 D/C	132	131	145	152	716	-
230 D	132	-	145	152	-	719
332 C	-	131	145	152	-	719

Produsent



Ossenberg GmbH
Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79
48432 Rheine
DEUTSCHLAND

From us you will receive only products in accordance with the guidelines of the Medicine Devices Act.

Of course, we are certified according to DIN EN ISO 13485 & 9001.



Reg.-Nr.: MQ 0115318

