

SEKUMATIC® FK



- Surt tørkemiddel for kirurgiske instrumenter samt annet medisinsk utstyr
- ▲ Flekkfri tørking av kirurgiske instrumenter, beholdere, vogner og senger
- ▲ CE-merket i henhold til MDD 93/42/EØF
- ▲ Oppfyller standarden for vaskedekontaminatorer, ISO 15883

Surt tørkemiddel for reduksjon av tørketiden i spyle-/vaskedekontaminatorer

- Sekumatic® FK er et flytende, surt tørke- og skyllemiddel som reduserer tørketiden og motvirker kalkbelegg. Den lave pH-verdien gir flekkfri tørking uten å etterlate rester på rene gjenstander etter alkalisk rengjøring.

Produktet er formulert med korrosjonshemmende midler for å beskytte metallinstrumenter og maskiner.

- ▲ **Bruksanvisning:** Sekumatic® FK brukes i første rekke for å lette tørkingen av produkter i rustfritt stål, som f.eks. kirurgiske instrumenter, beholdere, vogner og senger. Produktet kan også brukes til laboratorieglass samt gjenstander av plast og elastomerer (f.eks. gummi).
Kun for profesjonell bruk.

For å lette tørkingen av kirurgiske instrumenter samt annet medisinsk utstyr, anbefales en dosering på 0,3–1 ml/l i den avsluttende skyllefasen.

Til kabinettmaskiner anbefales en dosering på 1–2 ml/l.

- ▲ **Teknisk informasjon:** Kjemisk sammensetning: Ikke-ioniske tensider og sitronsyre, pH-verdi konsentrat: 2,0, pH-verdi i bruksløsning (20 °C) ~ 5,0, densitet: 1,05 g/ml.

- ▲ **Forpakninger:**

Art. nr.: 3030650	4 x 2 l
Art. nr.: 3088500	3 x 5 l
Art. nr.: 3022570	1 x 20 l