

# SEKUMATIC® FRE



- Spesielt egnet for pH-ømfintlige materialer
- ▲ Kombinasjon av tensider og protease for å optimere rengjøringsseffekten
- ▲ CE-merket i henhold til MDD 93/42/EØF
- ▲ Oppfyller standarden for vaskedekontaminatorer, ISO 15883

## pH-nøytralt enzymbasert maskinoppvaskmiddel for spyle-/vaskedekontaminatorer

□ Sekumatic® FRE er et enzymbasert maskinoppvaskmiddel tilpasset for spyle-/vaskedekontaminatorer.

Effekten er i første rekke basert på proteinnedbrytende enzymer og i mindre grad på den kjemiske effekten. Dette gir både god rengjøringsseffekt på organiske forurensninger som f.eks. blod og andre kroppsvæsker samt en skånsom materialpåvirkning.

▲ **Bruksanvisning:** Sekumatic® FRE kan benyttes til rengjøring av alle typer medisinsk utstyr, men er spesielt egnet for pH-ømfintlig operasjonsutstyr.  
**Kun for profesjonell bruk.**

Den optimale arbeidstemperaturen for Sekumatic® FRE er 55–60 °C, men produktet er formulert for også å gi høy effekt ved lave temperaturer (40–55 °C)

Avhengig av vannkvaliteten anbefales en dosering på ca. 2–8 ml/l (0,2–0,8 %).  
Sekumatic® FRE motvirker kalkbelegg i maskin, munnstykke og rørledning.

▲ **Teknisk informasjon:** Kjemisk sammensetning: Ikke-ioniske tensider og proteaseenzymer, pH-verdi konsentrat: 5,5, pH-verdi i bruksløsning (20 °C) ~ 5,0, densitet: 1,06 g/ml.

▲ **Forpakninger:**

Art. nr.: 3022550	3 x 5 l
Art. nr.: 3029510	1 x 200 l