

# SEKUMATIC® MULTICLEAN



- Eget for aluminium og anodisert aluminium
- ▲ Ferdig løsning har pH > 10 ved 55 °C
- ▲ Parfyme- og skumfri (inneholder ikke tensider)
- ▲ CE-merket i henhold til MDD 93/42/EØF
- ▲ Oppfyller standarden for vaskedekontaminatorer, ISO 15883

## Mildt alkalisk maskinoppvaskmiddel med aluminiumsbeskyttelse for spyle-/vaskedekontaminatorer

- Sekumatic® Multiclean er et flytende, alkalisk maskinoppvaskmiddel for medisinske og dentale instrumenter, med utmerket rengjøring av typisk smuss som f.eks. blod, proteiner og serum.

Produktet er formulert for å kombinere effektiv oppløsning av smuss med høy materialkompatibilitet (inkludert anodisert aluminium) samt skånsomhet mot oppvaskgodset.

- ▲ **Bruksanvisning:** Det viktigste bruksområdet utgjøres av medisinske instrumenter som tåler termisk desinfisering. Den optimale arbeidstemperaturen for Sekumatic® Multiclean er 55 °C. Den ferdige bruksløsningen har pH > 10 ved 55 °C.

**Kun for profesjonell bruk.**

Avhengig av vannkvaliteten anbefales en dosering på ca. 2–8 ml/l (0,2–0,8 %) gjennom maskinens alkalieresistente doseringspumpe. Sekumatic® Multiclean motvirker kalkbelegg i maskin, munnstykke og rørledninger.

- ▲ **Teknisk informasjon:** Kjemisk sammensetning: Kaliumhydroksid (tensidfri), pH-verdi konsentrat: 13,4, pH-verdi i bruksløsning (20 °C) ~ 11,5, densitet: 1,30 g/ml. Ledeevne (3–5 ml/l, 20 °C): 2,2–3,2 mS/cm.

- ▲ **Forpakninger:**

Art. nr.: 3045330	3 x 5 l
Art. nr.: 3045350	1 x 20 l
Art. nr.: 3045360	1 x 200 l