

Rely+On™ PeraSafe™

BLANDINGSPROSEDYRE

Bruksløsningen

Har en lys blå farge og skarp lukt med en pH på 8, konsentrasjon på 1,62% og holdbarhet 24 timer.

PeraSafe har dokumentert effekt på

- bakterier, inkl mykobakterier (TBC)
- virus (alle kjente virusfamilier)
- sopp

Dokumentert effekt på sporer som Clostridium difficile med flere.

Desinfeksjon av utstyr og flater

Rely+On™ PeraSafe™ er primært et instrumentdesinfeksjonsmiddel, men kan også benyttes til overflatedesinfeksjon ved mykobakterier (TBC) og Clostridium difficile.

Utstyr/instrumenter

Utstyret skal rengjøres for all forurensning før desinfeksjon. Sammensatt utstyr demonteres før det legges i bruksløsningen. La utstyret ligge 10 minutter i Rely+On™ PeraSafe™ bruksløsning. Skyll godt med sterilt vann. Tørk godt før utstyret settes sammen igjen.

Utstyr og flater ved desinfeksjon av mykobakterier (TBC)

Bearbeid flaten grundig med en fuktet svamp eller lignende sammen med Rely+On™ PeraSafe™ bruksløsning. Legg utstyret i bruksløsningen. Virketid 10 minutter. Skyll godt med rent vann. Bruksløsningen kan ha noe sterk lukt.

Materialpåvirkning

Rely+On™ PeraSafe™ har god kompatibilitet med de fleste typer materialer.

- **Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.**
- **Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!**



- 1. Fyll flasken med 1 liter lunkent vann.**



- 2. Klipp opp og tilsett doseposen å 16,2 gram.**



- 3. Blandes godt ved at flasken vendes 2-3 ganger. Vent i ca. 10 minutter til bruksløsningen er klar.**

Rely+On™ Virkon®

BLANDINGSPROSEDYRE

1 tablett pr. 1/2 liter vann
gir 1% bruksløsning

Bruksløsningen

Har en rosa farge, pH på 2,6 og en holdbarhet i 5 døgn.

Virkon har dokumentert effekt på

- bakterier *
- virus
- sopp

* Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og Clostridium difficile.

Desinfeksjon av IKKE SYNLIG forurenset utstyr og flater

Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i **10 minutter**. Skyll godt med rent vann.

Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid **10 minutter**. Ettetørk med våt klut.

Desinfeksjon av SYNLIG forurenset utstyr og flater

Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i **30 minutter**. Skyll godt med rent vann.

Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid **30 minutter**. Ettetørk med våt klut.

Desinfeksjon av tekstiler

Bløtlegg tekstilene i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i **10 minutter**. Følg deretter tekstilenes vaskeanvisning.

Materialpåvirkning

Ingen negativ materielpåvirkning på plast, epoxy og rustfritt stål. Begrensninger på mykmetaller og legeringer.

Anbefales ikke til desinfeksjon av endoskoper.

- **Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.**
- **Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!**



1. Fyll flasken med 500 ml lunkent vann.



2. Tilsett 1 stk. Rely+On™ Virkon® tablett.



3. Vend flasken 2-3 ganger og vent til tablett er helt oppløst.

puls
et selskap i handicare

Telefon 23 32 30 00 - www.puls-norge.no