

# Incidin® Duo

Rengjørende og desinfiserende kluter

**Spritkluter med rengjøringsmiddel til rengjøring og desinfisering av ikke-invasivt medisinsk utstyr - gir hygienisk rene overflater på noen sekunder.**

## EFFEKTIV ALKOHOL-BLANDING MED RENGJØRINGSMIDDEL

Incidin Duo-klutene inneholder en blanding av 70 % denaturert etanol, 5 % IPA og et rengjøringsmiddel.

Incidin Duo er beregnet på rengjøring og desinfisering av harde overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr.

Klutene er testet på et bredt spekter av mikroorganismer og gir hygienisk rene overflater på ett minutt, uten å etterlate rester.

## FORDELER

**Kluter:** Klutene er klare til bruk uten unødvendig svinn. Krever ingen forberedelser.

**Hurtig desinfeksjonseffekt:** Hurtig desinfisering og rengjøring av flater.

**Sikker og solid lukkemekanisme på pakken:** Forhindrer at kluten tørker ut.



## SLITESTERKT MATERIALE

Incidin Duo-klutene består av et nytt og innovativt, syntetisk materiale. Incidin Duo-klutene har svært høy absorberingsevne og loer svært lite.

## SPESIFIKASJONER

**Innhold:** 70 % denaturert etanol, 5 % IPA, vann, rengjøringsmiddel

**Holdbarhet:** 24 måneder fra produksjonsdato

**Klutmateriale:** Hvit 100 % spunlace-polyester med hullstruktur, 50 g/m<sup>2</sup>

## INCIDIN DUO EFFEKTABELL

EN-TESTMETODE	FORHOLD	KONTAKTTID
<b>BAKTERICID EFFEKT</b>		
EN 13727	Skittent	1 minutt
EN 13697	Skittent	1 minutt
EN 14561	Skittent	1 minutt
<b>FUNGICID EFFEKT</b>		
EN 13624	Rent	5 minutter
EN 14652	Skittent	1 minutt
<b>MYKOBAKTERICID EFFEKT</b>		
EN 14653	Skittent	1 minutt
EN 14348	Skittent	1 minutt
<b>VIRUSID EFFEKT</b>		
EN 14476 Influenta A	Rent	1 minutt

## PRODUKTINFORMASJON

PRODUKT-BESKRIVELSE	ARTIKKEL-NUMMER	KLUT-STØRRELSE	ANTALL KLUTER I PAKKEN	ESKE-STØRRELSE
Incidin Duo Maxi	3077680	300 mm x 250 mm	40 kluter	15 pakker per eske

LES ALLTID INFORMASJONEN PÅ PRODUKTETIKETTEN OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.

### MARKEDSFØRES AV

PULS AS  
Brynsveien 14  
0667 OSLO  
+47 22 30 05 00

www.puls-norge.no

© 2015 Ecolab. All rights reserved.  
6937/01.15



Pal International Limited  
Bilton Way, Lutterworth  
Leicestershire, LE17 4JA  
+44 (0) 1455 555 700



**puls**  
et selskap i handicare

**ECOLAB®**