

# Koble deg på og av med nye CuroCell®



## Sammen for en verden uten trykksår

Trykksår er ikke bare et smertefullt problem for brukeren. Fem prosent av Europas årlige helsebudsjett brukes til behandling av trykksår, et helseproblem som sluker mange hundre millioner kroner og mange arbeidstimer i helsesektoren. Forskning viser at hvis alle fylkeskommuner i Sverige investerer bare 32 millioner kroner i madrasser som forebygger trykksår, kan de spare opptil 1,44 milliarder kroner\* på bare fem år.

Care of Sweden hjelper helsesektoren med å ta bedre vare på brukerne, blant annet ved å forebygge trykksår. Hovedkontoret, forsknings- og utviklingsavdelingen og fabrikken ligger i Tranemo i Vest-Sverige, og produktene våre brukes ved mange institusjoner i Sverige og mange andre deler av verden. Vi tilbyr kvalitetsprodukter, kunnskap og opplæring innen ulike temaer, for eksempel trykksår og pleiesenger. Målet vårt er å samarbeide med helsesektoren for å utrydde trykksår.

TIDLIG RISIKOVURDERING

FOREBYGGENDE ARBEID



KUNNSKAP OG OPPLÆRING

DE RIKTIGE PRODUKTENE

\*Health economic report, Nordic Health Economics, 2017.  
Kontakt din Care of Sweden-representant for å få tilgang til hele rapporten.





## Nye CuroCell® A4 gjør arbeidsdagen enklere

CuroCell® A4 er et nytt og helautomatisk madrass-system, som er utformet for å gi brukeren svært god komfort, samtidig som man sparer tid og ressurser i arbeidet for å forebygge trykksår opptil kategori 4.

Med en ny pulserende modus, som tilpasser seg etter brukerens individuelle behov og omstendigheter, samarbeider pumpen og madrassen helt automatisk. Dette er et helt nytt hjelpemiddel i kampen mot trykksår.

Koble på – og koble av. Nye CuroCell® A4 gir brukeren bedre komfort, sikrer bedre helseøkonomi og gir helsepersonellet en enklere arbeidsdag.



# Revolusjonerende for både brukeren og helsepersonell

Med ny teknologi og smarte innovasjoner øker vi komforten for brukeren, samtidig som systemet er enkelt og trygt å bruke.



Alle madrasser kan brukes med den samme pumpen.

## Økt komfort for brukeren

Madrassene er utformet slik at brukeren får svært god komfort, for å gi minimal vevsforskyvning og for å sikre et godt mikroklima. Air Flow Control™ sikrer for eksempel at luften i madrassens celler gjenbrukes, slik at strømforbruk og støy reduseres, og slik at brukeren opplever en jevn temperatur.

- **STILLE, UTEN VIBRASJONER**
- **REDUSERT VEVSFORSKYVNING**
- **MILD PULSERING**

## Enklere å bruke enn noensinne

Den helt nye pumpen optimaliserer automatisk innstillingene for personen som bruker madrassen. Det kreves ingen manuelle innstillinger. I tillegg kan den samme pumpen brukes med alle madrassene i CuroCell® A4-serien. Det er ganske enkelt umulig å koble den til feil.

- BRUKERVENNLIG GRENSESNIITT
- DESIGNET FOR Å OPPFYLLE STRENGE HYGIENEKRAV
- HELAUTOMATISK PUMPE
- PACK&GO® TØMMER MADRASSEN EFFEKTIVT FOR LUFT



Det kreves ingen manuelle innstillinger.



HLR-tilkoblingen beholder luften i madrassen under transport.



### Pack&Go® forenkler tømmingen

Med Pack&Go®-funksjonen trenger du bare å trykke på en knapp for å tømme madrassen for luft. Personellet kan enkelt pakke ned madrassen, og de slipper å klemme ut luften manuelt fra brukte og skitne produkter.



### Air Flow Control™

En ny teknologi som sørger for konstant temperatur, bedre brukerkomfort og lavere energiforbruk.

## En løsning som alle kan stole på

Nye CuroCell® A4 er trygg. Pumpen bruker lav spenning (12 V), noe som fører til at det ikke oppstår farlige situasjoner hvis strømledningen klemmes i sengen. Med HLR-tilkoblingen kan madrassen tømmes for luft umiddelbart, slik at HLR kan påbegynnes.

- LAV SPENNING (12 V)
- FEILSIKKER HLR-TILKOBLING
- LUFTNIVÅET OPPRETTHOLDES VED STRØMBRUDD
- AUTOMATISK ALARM VED TRYKKFALL




## Nytt klinisk program: Pulserende modus

Nye CuroCell® A4 har et eksklusivt, nytt program – pulserende modus. Programmet er utformet for å sikre bedre behandling og mer behagelig belastning for brukeren. Forskning viser at pulserende modus er det optimale valget for å sikre jevn sirkulasjon i brukerens vev<sup>(1)</sup>. Basert på kliniske forsøk har vi bestemt oss for å anbefale og utstyre CuroCell® A4 med pulserende modus som standardinnstilling. To andre kliniske programmer, vekslende og konstant lavt trykk (CLP), kan velges ved hjelp av en knapp på displayet.


Nytt for  
CuroCell®

### 1. PULSERENDE

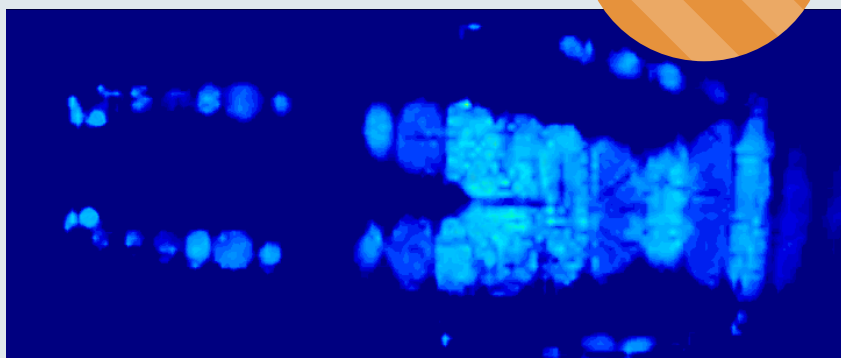

Pulserende modus er et program med skånsomme luftpulser som øker komforten og sikrer jevn sirkulasjon i brukerens vev.

### 2. VEKSLLENDE

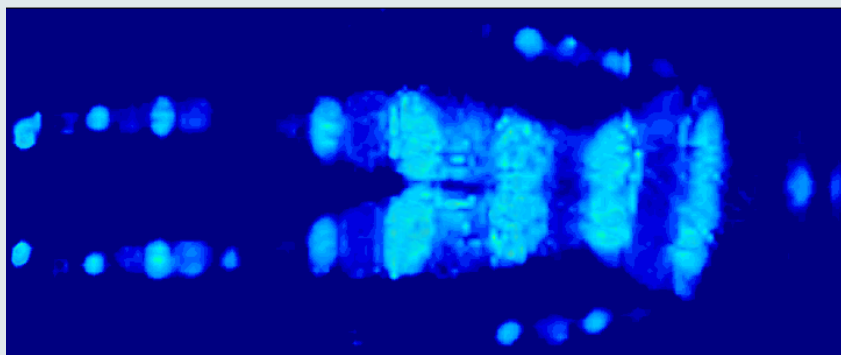

Et konvensjonelt vekslende program som gir god avlastning, men høyt terskeltrykk.

NB! Bildene er kun ment som forklaring, og viser ikke klinisk behandling.

#### Referansemateriale

<sup>1)</sup> Dr. Peter Worsley, dr. Luciana Bostan og professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Upublisert manuskript. University of Southampton, 2018.

## «Fint, enkelt og intuitivt å betjene!»

Programinnstillingene er enklere enn mange av produktene jeg har brukt tidligere. Mange pumper er ganske kompliserte, men dette systemet virker fint, enkelt og intuitivt å betjene. Nå er det enkelt å se forskjellen mellom de ulike programmene. HLR-funksjonen har også blitt mye enklere. HLR-merkingen er godt synlig, og ikke skjult i madrassen. Jeg synes at Pack&Go-funksjonen er en stor fordel. Det betyr at vi slipper å legge ut madrassen for å klemme ut luften.

Jesper Nilsson, sykepleier med ansvar for madrasser, Svenljunga i Sverige



## «Displayets plassering gjør livet enklere for meg som er delvis funksjonshemmet.»

Den nye HLR-tilkoblingen og transportfunksjonen er helt fantastisk. Det gir meg større trygghet, i motsetning til andre systemer der jeg havner på sengebunnen før jeg kommer fram til røntgenavdelingen. Systemet er også supert hvis det oppstår strømbrudd, siden lufttrykket opprettholdes i opptil åtte timer. Displayets plassering over pumpen gjør livet enklere for meg, siden jeg er delvis funksjonshemmet. Selv om systemet har avanserte og intelligente funksjoner, oppleves det som enkelt og fleksibelt.


Mikael Bynander, hjemmebruker

## «Pumpen er så stillegående, at jeg ikke var sikker på om den var i gang!»

Pumpen oppleves som avansert, men den er likevel svært enkel å bruke. Displayet er enkelt å forstå og betjene. I tillegg er pumpen så stillegående, at jeg ikke var sikker på om den var i gang.

Petra Mellberg, sykepleier, Helsingborg kommune i Sverige



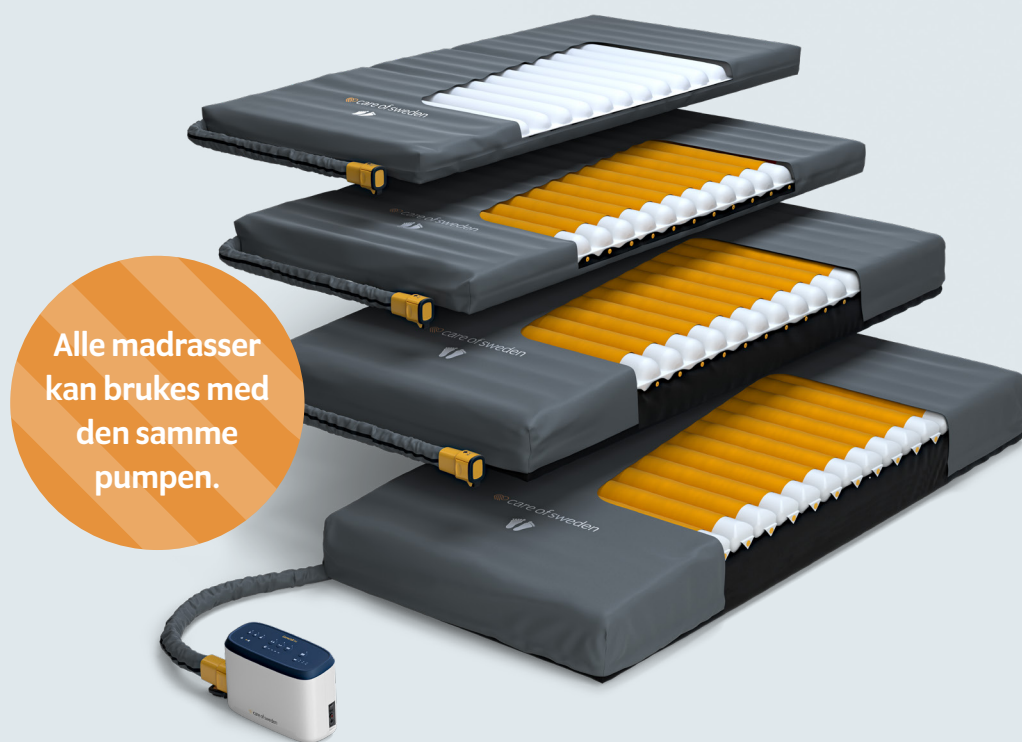

## CuroCell® A4 er tilgjengelig i følgende modeller:

- CuroCell® A4 OP10: 10 cm overmadrass, opptil 160 kg
- CuroCell® A4 CX10: 10 cm overmadrass, opptil 200 kg
- CuroCell® A4 CX16: 16 cm erstatningsmadrass, opptil 200 kg
- CuroCell® A4 CX20: 20 cm erstatningsmadrass, opptil 250 kg

**CuroCell® A4 er også tilgjengelig som manuell modell, CuroCell® M4.**

 care of sweden  
SUPPORTING LIFE