

# Brukermanual

## NATTBORD QCLASSIC



Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra leverandøren. Dette gjelder også for de tilhørende tegningene og skjemaene.

Denne brukerveiledningen gjelder for heisens standardmodell. Leverandørens ansvar bortfaller dersom det gjøres endringer eller tilpasninger som ikke på forhånd er skriftlig avtalt.

Vennligst kontakt leverandøren for opplysninger vedrørende justering, vedlikehold eller reparasjoner.

## INNHold

1. Introduksjon
2. Leveranse
3. Sikkerhetsinstruksjoner
4. Monteringsanvisning
5. Bruksområde
6. Bruksanvisning
7. Tilbehør
8. Rengjøring
9. Tekniske spesifikasjoner

**Produsent:**  
ComfortSystem AB  
Box 4034  
561 04 Husqvarna  
Sverige

**Leverandør:**  
Mediq Norge AS  
Brynsveien 14  
0667 Oslo  
Tlf: 67 02 43 00  
[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)

## 1. Introduksjon

Qclassic nattbord tilvirkes i Sverige etter kvalitetsnormer og produsenten er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001. Hvert eneste produkt testes på fabrikk før det leveres ut.

**NB!** Før nattbordet tas i bruk må bruksanvisningen leses nøye. Nattbordet skal bare brukes i henhold til instruksjonene. Ved avvik av dette er ikke produsenten ansvarlig for feil eller skader som måtte oppstå. Det er derfor viktig at bruksanvisningen alltid oppbevares på et dertil egnet sted og at den er lett tilgjengelig.

**NB!** Nattbordet kan brukes av pasient/bruker alene eller under oppsyn av pleiepersonell.

**OBS!** Grunnleggende opplæring skal foretas av produsent, leverandør eller annen autorisert person. Opplæringen skal bekreftes med en protokoll.

## 2. Leveranse

Nattbordet leveres innpakket i plast og papp. Nattbordet er ferdig montert i forpakningen og det følger ikke med noen løse deler. Når forpakningen åpnes skal den stå på høykant med etiketten opp. Forpakningen åpnes i siden og bordet kan rulles ut.

**NB!** Før nattbordet tas i bruk skal det sjekkes at forsendelsen er uskadd og at leveransen stemmer overens med pakkseddelen. Alle uregelmessigheter skal snarest meldes og eventuelt dokumenteres. Alle mangler skal umiddelbart meldes til speditør eller leverandør.

## 3. Sikkerhetsinstruksjoner

**NB!** Nattbordet må bare brukes på et jevnt, hardt underlag

**NB!** Nattbordets spiseplate må ikke utsettes for mer belastning utover den oppgitte maksimalbelastning.

**NB!** Man må ikke lene seg mot uttrekket spiseplate.

**NB!** Vær forsiktig ved betjening av skuffer og spiseplate for å hindre klemming av egne eller andres fingre.

**NB!** Nattbordet må ikke benyttes dersom det er oppdaget feil eller mangler som kan være farlige for pleier, bruker, tredjepart eller nattbordet selv eller innhold.

**NB!** Personalet skal instruere bruker i bruken av nattbordet.

**NB!** Før nattbordet tas i bruk skal det sjekkes for eventuell feil, skader eller mangler.

- NB!** Nattbordet må bare brukes av de som er mentalt eller fysisk i stand til å bruke det.
- NB!** Nattbordet må bare repareres med originaldeler. Dersom uoriginale deler benyttes, frafaller produsenten og leverandørens ansvar.
- NB!** Vask og vedlikehold nattbordet i henhold til instruksjonen. Nattbordet kan ikke høytrykkspyles eller vaskes i vaskemaskin.

#### 4. Monteringsanvisning

Nattbordet leveres ferdig montert fra produsent. Nattbordet kan enkelt tilpasses for å passe høyre og venstre side av sengen:



Ta tak med begge hender i skuffkabinettet og løft dette av.



Skrut ut de to stjerneskrueene som fester hakebeslaget.



Skrut tilbake beslaget på kabinettets andre side. Heng tilbake skuffkabinettet.

#### 5. Bruksområde

Qlassic nattbord er konstruert for å underlette for brukere og pleiepersonell i hjemmemiljø og på institusjon.

- Nattbordet er justerbart i høyden med et enkelt håndgrep
- Det kan brukes både på venstre og høyre side av sengen
- Uttrekkbar spiseplate med støtteskiner som holder spiseplaten på plass
- Vinkeljusterbar spiseplate kan fås som tilbehør
- Kabinett med to skuffer og en skohylle

**NB!** Produktet skal kun brukes i normal innemiljø med temperatur intervall på +10 til +40 grader.

**NB!** Produktet får kun benytte deler og tilbehør godkjent av produsent.

## 6. Bruksanvisning

### Høydejustering av Qclassic



Stå som illustrert på bildet på ene siden av nattbordet. Ta et stødig tak i bordplaten med begge hendene, samtidig som du holder inne låsespaken med høyre hånd. Når spaken er trykt inn kan du fritt heve og senke bordplaten. For å heve bordet, løft opp i ønsket høyde og slipp spaken. For å senke bordet, trykk ned til ønsket høyde og slipp spaken.



Ta tak i den hvite listen og dra ut spiseplaten til låseknappen kommer frem og låser platen. For å skyve inn platen igjen, trykk ned låseknappen og skyv inn platen til utgangsposisjon.



Qlassic nattbord har individuell brems på hvert hjul. Ved bruk av nattbordet over en seng, holder det å låse de to ytre hjulene.

**NB!** Alle fire hjulene skal være låst når bordet står parkert ved siden av sengen eller på en annen plass. Med låste bremses står bordet helt stødig.

**NB!** Om ikke bremsene er låst finnes det en risiko for ulykke om bruker eller noen andre støtter seg til bordet.

## 7. Tilbehør

### Vinkeljusterbar spiseplate



Løft spiseplaten i ønsket høyde og sørg for at støttebenet låses i hakket som finnes under platen.



For å bytte side på spiseplaten, løft opp platen, roter en halv gang rundt og hekte den på plass på motsatt side.

